

Durchführung der Probenentnahme für den PCR-Test

1. Öffnen Sie die Salzlösung und nehmen Sie diese in den Mund.
2. Spülen Sie **bei geschlossenem Mund 1 Minute lang** gründlich (ähnlich wie Mundwasser).
3. Über dem Waschbecken transferieren Sie nun die Salzlösung in das Probenröhrchen.
4. Verschließen Sie das Probenröhrchen.
5. Stellen Sie das verschlossene Probenröhrchen in den dafür vorgesehen Ständer.
6. Bewahren Sie den Zettel mit Ihrem QR-Code auf, um später das Test-Zertifikat abrufen zu können (www.testung.at/ergebnis).
7. Desinfizieren Sie Ihre Hände!